



### Digue dentaire **Oralsafe**

Digue dentaire Oralsafe en latex qui protège lors des contacts oraux-génitaux.

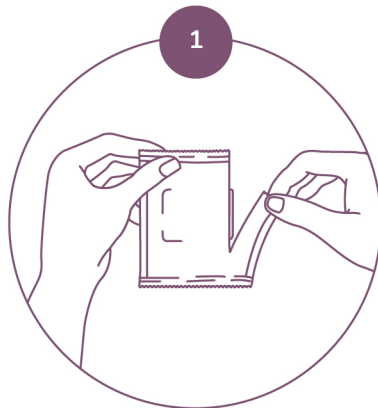


1  
Ouvrir l'emballage à la main, sortir le tissu de son enveloppe et dépliez le.

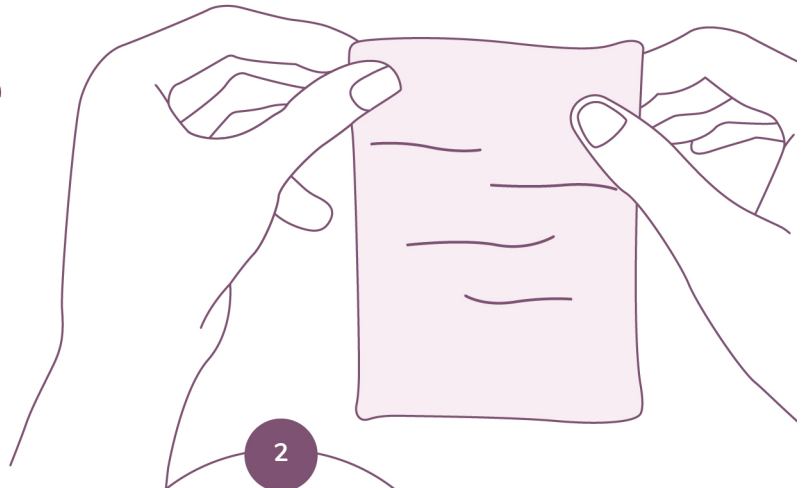

2  
Humectez la zone du vagin ou la zone anale avec un gel lubrifiant à base d'eau.



3  
Placez le sur l'entrée du vagin et le clitoris ou sur la zone anale. Maintenez le tissu bien placé durant l'acte.

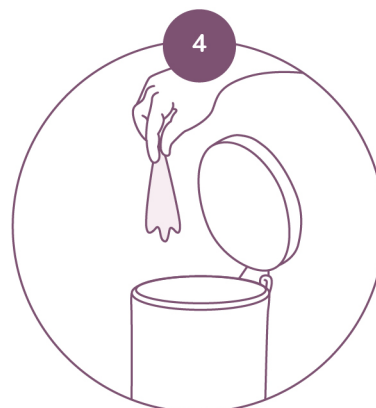

4  
Le tissu utilisé doit être jeté avec les ordures ménagères. Ne jamais le jeter dans les WC.