

Anneau de constriction

Pour le traitement de la dysfonction érectile (DE) avec des dispositifs à vide de stimulation de l'érection

Active Erection System / **Manual** Erection System

L'utilisation des anneaux de constriction est déterminante pour le bon fonctionnement du dispositif à vide de stimulation de l'érection. Les anneaux de constriction sont disponibles en taille 1 (9 mm), taille 2 (12 mm), taille 3 (15 mm), taille 4 (18 mm), taille 5 (21 mm). Tous les anneaux peuvent être élargis par l'utilisation. L'utilisateur détermine la taille de l'anneau adaptée à son pénis lors de la première utilisation : L'érection doit être de bonne qualité (sous l'effet de la constriction, mais avec une pression minimale et sans douleur.

Les anneaux de constriction sont prévus pour être utilisés plusieurs fois. Attendre au moins 60 minutes entre les utilisations afin d'éviter des blessures au pénis. Ces anneaux de constriction doivent être nettoyés à l'eau chaude savonneuse. Ils sont soumis à l'usure et peuvent se déchirer après plusieurs utilisations. Dans ce cas, de nouveaux exemplaires doivent être commandés.


Remarque : Ne laissez **jamais** l'anneau de constriction **plus de 30 minutes** sur votre pénis. Une utilisation prolongée peut entraîner des blessures définitives au pénis. Ne vous endormez pas avec l'anneau de constriction autour du pénis, car l'anneau pourrait entraîner des blessures définitives. N'utilisez pas d'anneaux de constriction lorsque vous êtes sous l'emprise d'alcool ou de drogues, car l'altération du jugement qu'ils provoquent pourrait augmenter le risque de blessure au pénis. Une mauvaise utilisation de l'anneau de constriction peut entraîner des inflammations, des blessures douloureuses, ou des lésions définitives au pénis. Les anneaux de constriction n'empêchent pas les grossesses.

Attention : L'utilisation d'un anneau de constriction peut aggraver un trouble médical déjà existant, tel que la maladie de la Peyronie, le priapisme, les rétrécissements urétraux. L'anneau de constriction peut contusionner ou endommager les vaisseaux sanguins du pénis ou du gland, entraînant des pétéchies, une hémorragie ou la formation d'un hématome. La taille de l'anneau de constriction doit être la plus grande capable de maintenir l'érection, car une constriction excessive peut blesser le pénis. Utilisez uniquement des lubrifiants hydrosolubles avec cet anneau de constriction.

Contre-indications : Voir mode d'emploi du dispositif à vide de stimulation de l'érection.


MD Dispositif médical

1

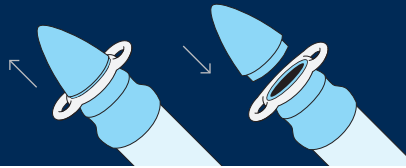


Mise en place de l'anneau de constriction

2

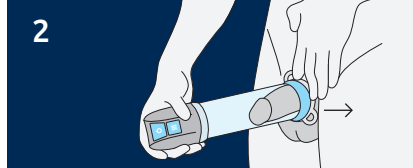


Passage de l'anneau de constriction du dispositif de stimulation de l'érection au pénis

3

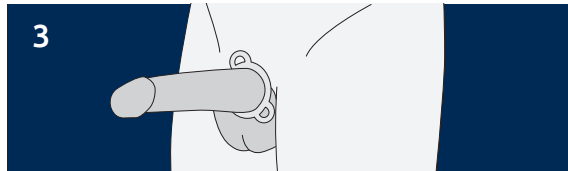


Position correcte de l'anneau de constriction pendant le rapport sexuel

4

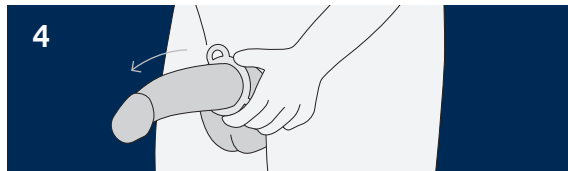

Retrait de l'anneau de constriction après le rapport sexuel

Anneau de constriction

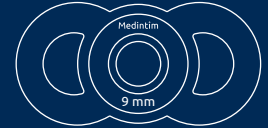

Medintim



REF: Ring 1
PZN: 17984963
HMV-Nr.: 99.27.01.0004
LOT: 15221A
2022-04-12
2026-03-12

09.03.2022

Made in Germany

www.medintim.de

Germany

64546 Mörfelden-Walldorf

8048 Zurich

Robert-Seidel-Hof 70

Jan Möstel

KESSEL medintim GmbH

